


## CACHE-AIGUILLE

### À UTILISER AVEC LES CARTOUCHES D'HUMATROPE®

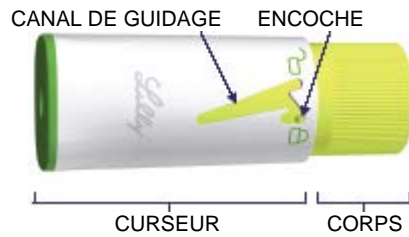

VERROUILLÉ DÉVERROUILLÉ  
Tournez le curseur pour verrouiller/déverrouiller.

www.lilly.ca

## MODE D'EMPLOI

### FIXATION ET UTILISATION DU CACHE-AIGUILLE

Le cache-aiguille vous permet de faire l'injection sans voir l'aiguille. Assurez-vous que le stylo est réglé selon les instructions du manuel d'utilisation.

#### **Quels types d'aiguilles peuvent-êtré utilisés avec le cache-aiguille?**

- Les aiguilles ne sont pas fournies. Vous pourriez avoir besoin d'une ordonnance pour vous procurer les aiguilles auprès de votre pharmacien.
- Les aiguilles de Becton, Dickinson and Company sont recommandées pour le stylo HumatroPen®.
- L'utilisation du cache-aiguille de votre stylo HumatroPen est optionnelle. **Si vous utilisez le cache-aiguille du stylo HumatroPen, vous devez utiliser une aiguille d'au moins 5 mm.**
- Demandez à votre professionnel de la santé quel calibre et quelle longueur d'aiguilles vous conviennent le mieux.

**1** Enlevez le capuchon du stylo. Fixez une nouvelle aiguille et enlevez les capuchons externe et interne de l'aiguille.

**2** Assurez-vous que le cache-aiguille est verrouillé. S'il ne l'est pas, verrouillez-le en tournant, sans pousser, le curseur et en positionnant l'encoche dans le canal de guidage comme illustré.



**3** Insérez la cartouche avec l'aiguille en place directement dans le cache-aiguille en appuyant fermement jusqu'au bout. Tournez la bague de dosage jusqu'à votre dose habituelle.



- 4** Déverrouillez le cache-aiguille en tournant le curseur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'encoche soit dans le canal de guidage comme illustré. Veillez à ne pas pousser le curseur une fois qu'il est déverrouillé afin d'éviter les piqûres avec l'aiguille.



- 5** Injectez la dose d'Humatrope selon les directives de votre professionnel de la santé. Dans un premier temps, insérez l'aiguille dans la peau à un angle de 90°. Le curseur bougera sur le corps du cache-aiguille à mesure que l'aiguille est insérée.



Puis, appuyez sur le bouton d'injection. Le cache-aiguille se verrouillera automatiquement quand vous retirerez l'aiguille de la peau.

- 6** Assurez-vous que le cache-aiguille est verrouillé. Faites soigneusement glisser le cache-aiguille en un seul mouvement et retirez-le du stylo.

Jetez les aiguilles usagées dans un contenant pour objets pointus et tranchants ou dans un contenant de plastique rigide doté d'un couvercle hermétique. Ne jetez pas les aiguilles directement avec vos ordures ménagères. Informez-vous auprès de votre professionnel de la santé sur les options adéquates de mise au rebut du contenant pour objets pointus et tranchants.

Remettez le capuchon sur le stylo.

Les parties sales peuvent être nettoyées avec un chiffon humide.  
N'UTILISEZ PAS d'alcool ni d'autres agents nettoyants.



Importé par :  
Eli Lilly Canada Inc.  
130, rue King Ouest, C.P. 73  
Toronto (Ontario)  
M5X 1B1

Fabriqué par :  
Eli Lilly and Company  
Pharmaceutical Delivery Systems  
Lilly Corporate Center  
Indianapolis, IN 46285, É.-U.

Humatrope® et HumatroPen® sont des marques déposées d'Eli Lilly and Company ou de l'une de ses filiales ou sociétés affiliées.

© 2008, 2020 Eli Lilly and Company. Tous droits réservés.

Date de révision : 26 juin 2020

