

**MODE D'EMPLOI**  
**PrMOUNJARO® KwikPen®**  
**tirzépatide injectable**

**Stylo-injecteur prérempli pour administration sous-cutanée réservé à l'usage d'un seul patient**

**Chaque stylo-injecteur contient 4 doses fixes, soit une dose à prendre par semaine.**

Stylo-injecteur à doses multiples dosé à 2,5 mg/0,6 mL

Stylo-injecteur à doses multiples dosé à 5 mg/0,6 mL

Stylo-injecteur à doses multiples dosé à 7,5 mg/0,6 mL

Stylo-injecteur à doses multiples dosé à 10 mg/0,6 mL

Stylo-injecteur à doses multiples dosé à 12,5 mg/0,6 mL

Stylo-injecteur à doses multiples dosé à 15 mg/0,6 mL



*Lilly*

**Renseignements importants à connaître avant de procéder à l'injection avec MOUNJARO KwikPen**

**Consultez ce « MODE D'EMPLOI » et les renseignements sur le médicament pour le patient avant d'utiliser votre stylo-injecteur prérempli à doses multiples MOUNJARO KwikPen et chaque fois que vous vous procurez un nouveau KwikPen, car de nouveaux renseignements peuvent s'ajouter.**

L'information qui s'y trouve n'est toutefois pas destinée à remplacer les directives de votre professionnel de la santé en ce qui concerne votre maladie ou votre traitement.


Demandez à votre professionnel de la santé comment utiliser MOUNJARO KwikPen de la bonne façon.

- MOUNJARO KwikPen est un stylo-injecteur prérempli à doses multiples réservé à l'usage d'un seul patient.
- **Un MOUNJARO KwikPen contient 4 doses fixes de 0,6 mL, soit une dose à prendre par semaine.**
- Injectez 0,6 mL en une seule injection hebdomadaire sous la peau (par voie sous-cutanée).
- Après l'administration des 4 doses (soit un mois de traitement), jetez le KwikPen, y compris le médicament inutilisé. Après l'injection des 4 doses hebdomadaires, vous serez incapable de régler l'indicateur de dose pour obtenir une dose complète.

- **Ne transférez pas** la solution de MOUNJARO de votre KwikPen dans une seringue. **N'injectez pas** le médicament restant.
- **Ne prêtez** votre MOUNJARO KwikPen à aucune autre personne, même si l'aiguille du stylo-injecteur a été changée. Vous pourriez transmettre ou contracter une infection grave.
- Les personnes non voyantes ou qui ont un trouble de la vue ne doivent pas utiliser le KwikPen sans l'aide d'une personne ayant reçu la formation nécessaire pour l'utiliser.

## Guide des pièces


### Pièces du stylo-injecteur prérempli à doses multiples MOUNJARO (KwikPen)

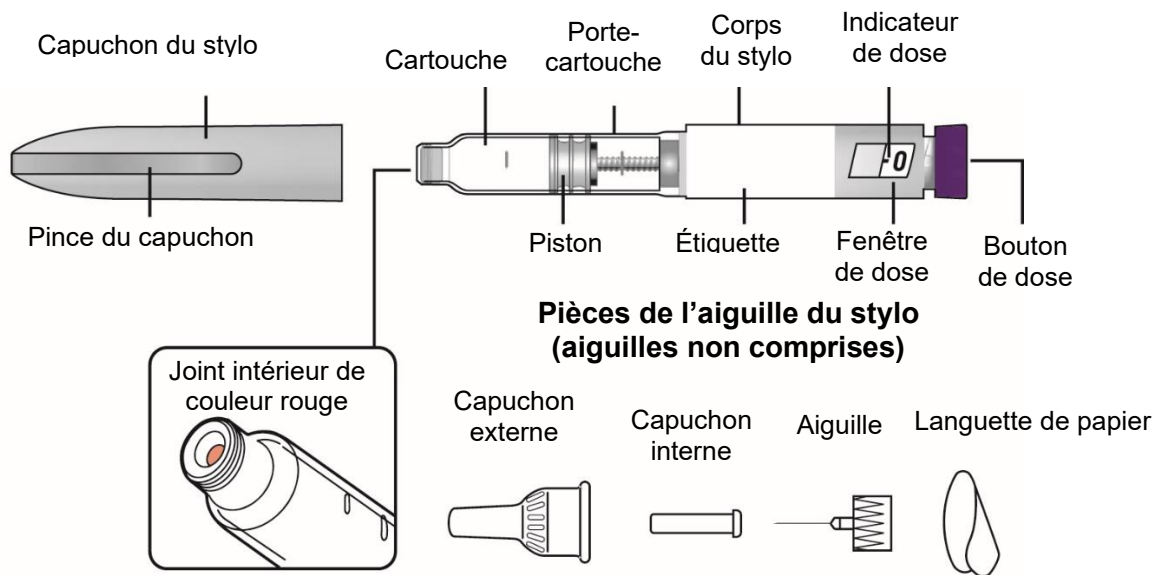

### Matériel nécessaire à l'injection


- 1 stylo-injecteur prérempli à doses multiples MOUNJARO KwikPen
- 1 aiguille pour stylo-injecteur (modèle recommandé par votre professionnel de la santé)
- Tampon imbibé d'alcool
- Compresse de gaze ou boule d'ouate
- Contenant pour objets pointus et tranchants ou contenant ménager

### Préparation de l'injection avec MOUNJARO KwikPen

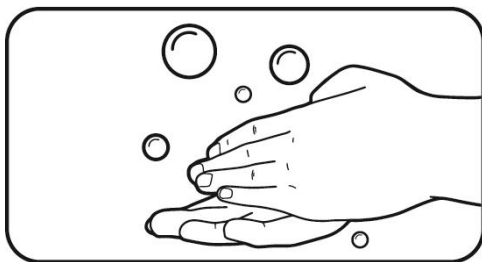

#### Étape 1 :


- Lavez-vous les mains à l'eau et au savon.

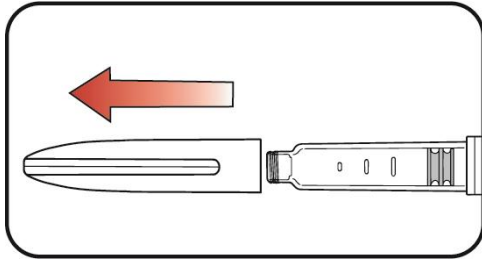

### Étape 2 :


- Retirez le capuchon du KwikPen en tirant tout droit.
- Inspectez le KwikPen et l'étiquette. **N'utilisez pas le KwikPen** si :
  - le nom du médicament ou la dose ne correspondent pas à ce qui est indiqué sur votre ordonnance;
  - la date de péremption est dépassée ou le KwikPen semble endommagé;
  - le médicament a été congelé, s'il contient des particules, s'il est trouble ou décoloré.

Vérifiez que la solution dans le KwikPen est incolore ou légèrement jaune.

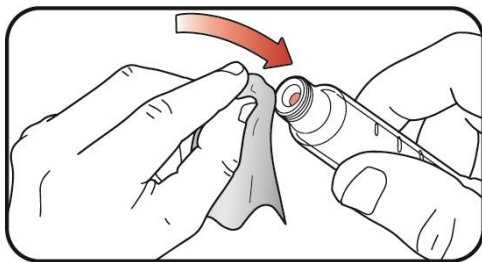


### Étape 3 :

- Nettoyez le joint intérieur de couleur rouge avec un tampon imbibé d'alcool.

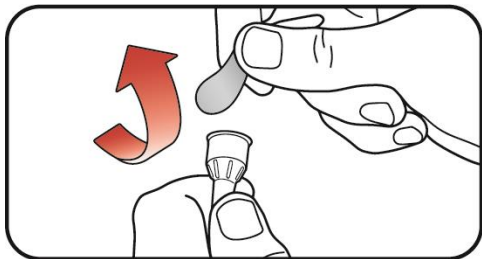


### Étape 4 :

- **Utilisez une nouvelle aiguille pour stylo-injecteur.** Utilisez toujours une nouvelle aiguille à chaque injection afin de prévenir les infections et l'obstruction de l'aiguille.
- Retirez la languette de papier du capuchon externe de l'aiguille.

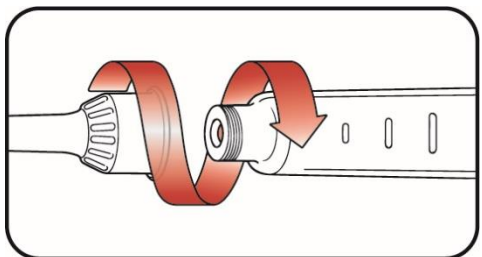

### Étape 5 :

- Insérez l'aiguille munie de son capuchon tout droit dans le KwikPen, puis vissez-la jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.

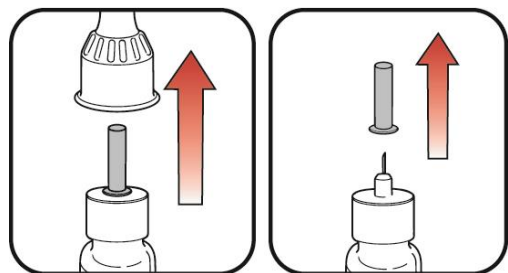


a. Capuchon externe de l'aiguille


b. Capuchon interne de l'aiguille

### Étape 6 :


- Retirez le capuchon externe de l'aiguille et mettez-le de côté en vue de le réutiliser.
- Retirez le capuchon interne de l'aiguille. Jetez-le à la poubelle.

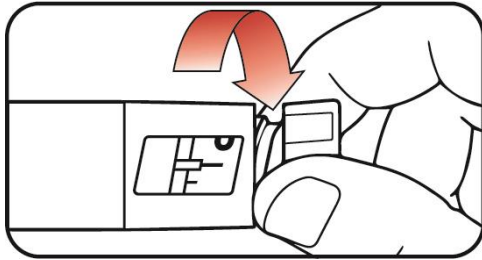

#### Étape 7 :


- Tournez lentement le bouton de dose jusqu'à ce que vous entendiez **2 clics** et que la ligne allongée  dans la fenêtre de dose soit alignée avec l'indicateur de dose. Il s'agit de la position d'amorçage.

Vous pouvez tourner le bouton de dose dans une direction ou dans l'autre pour obtenir la position d'amorçage.

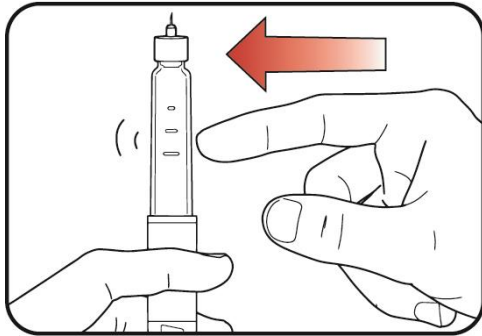


#### Étape 8 :

- Tenez le KwikPen avec l'aiguille pointée vers le haut.
- Tapotez le porte-cartouche pour que les bulles d'air remontent à la surface.

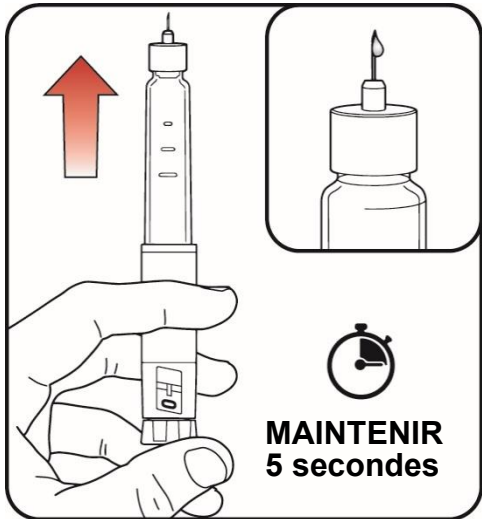


#### Étape 9 :

- Amorcez le KwikPen. Pour cela, **appuyez sur le bouton de dose** jusqu'au bout, et jusqu'à ce que l'icône  apparaisse dans la fenêtre de dose. **Maintenez le bouton de dose enfoncé et comptez lentement jusqu'à 5.** Cela expulsera une petite quantité de médicament. **N'injectez pas** le médicament.

L'amorçage permet de retirer l'air de la cartouche et de vous assurer que le KwikPen fonctionne bien. Votre KwikPen a été amorcé si une petite quantité du médicament s'écoule de l'extrémité de l'aiguille du stylo-injecteur.


- Si vous ne voyez pas de médicament à l'extrémité de l'aiguille, répétez les **étapes 7 à 9**, pas plus de deux autres fois.
- Si vous ne voyez toujours pas de médicament, changez l'aiguille du stylo-injecteur et répétez les **étapes 7 à 9**, pas plus d'une autre fois.
- Si vous ne voyez toujours pas de médicament, communiquez avec Lilly au 1-888-545-5972.

## Réalisation de l'injection avec MOUNJARO KwikPen



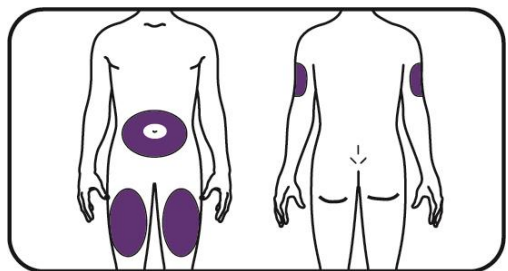


a. Vue de face

b. Vue de dos

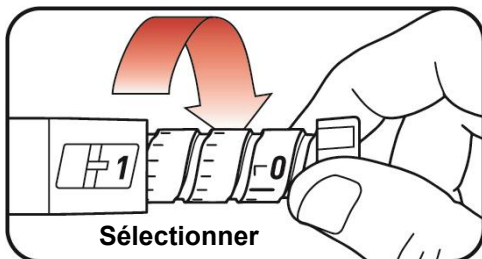

Sélectionner

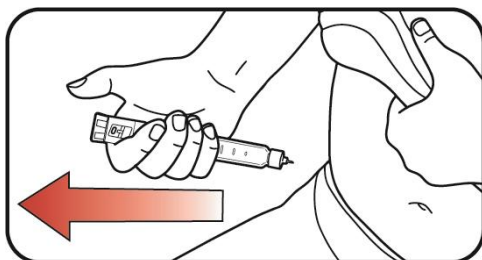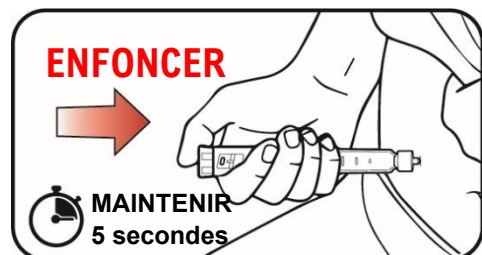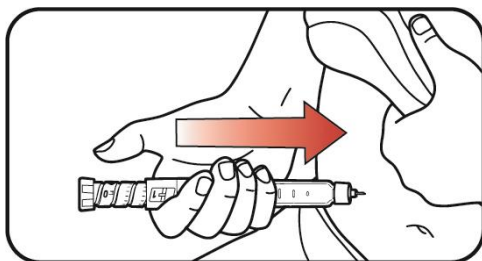

### Étape 10 :

- Choisissez un point d'injection.
  - a. Vous ou une autre personne pouvez injecter le médicament dans votre cuisse ou votre ventre (abdomen) à au moins 5 centimètres du nombril (voir l'illustration).
  - b. Une autre personne doit procéder à l'injection si elle est faite dans la partie supérieure arrière de votre bras.
- **Changez** de point d'injection chaque semaine (utilisez les points en alternance). Vous pouvez utiliser la même partie de votre corps, mais assurez-vous de choisir un point d'injection différent.

### Étape 11 :

- Tournez le bouton de dose jusqu'à ce qu'il s'arrête et que l'icône **1** apparaisse dans la fenêtre de dose. **L'icône 1 indique une dose complète (0,6 mL).**

### Étape 12 :

- a. Insérez l'aiguille dans votre peau.
- b. Injectez le médicament en **appuyant sur le bouton de dose** jusqu'au bout. **Maintenez le bouton de dose enfoncé et comptez lentement jusqu'à 5.** Vous devez attendre que l'icône **0** apparaisse dans la fenêtre de dose avant de retirer l'aiguille.

### Étape 13 :

- Retirez l'aiguille de votre peau. La présence d'une goutte du médicament à l'extrémité de l'aiguille est normale. Cela ne modifiera en rien votre dose.
- Assurez-vous que l'icône **0** apparaît dans la fenêtre de dose.


Si vous voyez l'icône **0** dans la fenêtre de dose, cela veut dire que vous avez reçu la totalité de la dose.

Si vous ne voyez pas l'icône **0** dans la fenêtre de dose, insérez de nouveau l'aiguille dans votre peau et terminez

l'injection. **Ne tournez pas** le bouton de dose pour revenir à l'icône **1**.

Si vous croyez toujours ne pas avoir reçu la totalité de la dose, **ne recommencez pas** ou **ne répétez pas** l'injection. Communiquez avec Lilly au 1-888-545-5972.


## Après l'injection avec MOUNJARO KwikPen

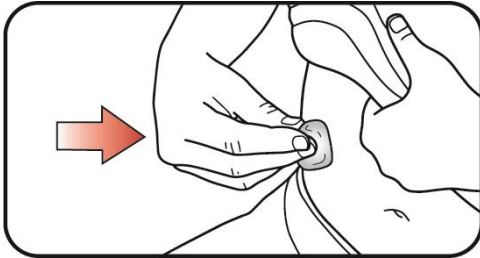

### Étape 14 :


- Si vous voyez du sang après avoir retiré l'aiguille de votre peau, appliquez une légère pression au point d'injection avec une gaze ou une boule d'ouate.

**Ne frottez pas** le point d'injection.

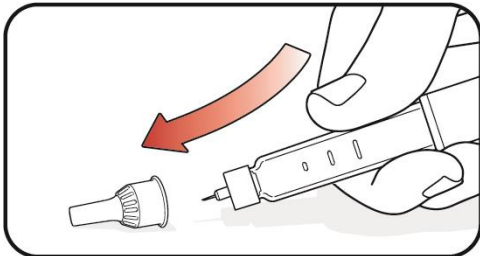

### Étape 15 :


- Remettez soigneusement en place le capuchon externe de l'aiguille.

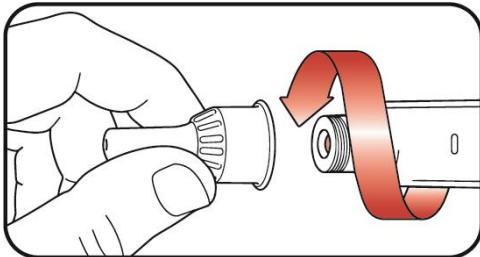

### Étape 16 :

- Dévissez l'aiguille munie de son capuchon et déposez-la dans un contenant pour objets pointus et tranchants (voir la section « Élimination de MOUNJARO KwikPen et des aiguilles »).

**Ne laissez pas** l'aiguille sur le KwikPen quand vous le rangez afin de prévenir les fuites, l'obstruction de l'aiguille et l'entrée d'air dans le KwikPen.

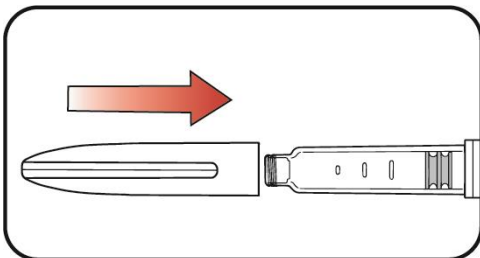

### Étape 17 :

- Remettez le capuchon sur le KwikPen.

**Ne rangez pas** le KwikPen sans avoir remis son capuchon en place.

## Entreposage de MOUNJARO KwikPen

### KwikPen non utilisés :

- Conservez les **KwikPen non utilisés** au **réfrigérateur** à une température de 2 °C à 8 °C.
- Les KwikPen qui n'ont jamais servi peuvent être utilisés jusqu'à la date de péremption figurant sur l'étiquette s'ils ont été conservés au réfrigérateur.
- **Ne congelez pas** votre KwikPen. Jetez le KwikPen s'il a été congelé.

### KwikPen en cours d'utilisation :

- Vous pouvez conserver votre **KwikPen en cours d'utilisation** à la **température ambiante** (maximum de 30 °C) pendant un maximum de 30 jours.
- Conservez le stylo-injecteur en cours d'utilisation à l'abri de la chaleur et de la lumière.
- Gardez votre KwikPen et les aiguilles hors de la portée et de la vue des enfants.
- Jetez le KwikPen 30 jours après la première utilisation, même s'il reste du médicament à l'intérieur.
- Jetez le KwikPen après l'administration des quatre doses hebdomadaires contenues dans le stylo-injecteur. Si vous tentez de vous injecter toute quantité restante du médicament dans le KwikPen, vous recevrez probablement une dose incomplète.

## Élimination du MOUNJARO KwikPen et des aiguilles

- Mettez les aiguilles dans un contenant pour objets pointus et tranchants immédiatement après leur utilisation.
- **Ne jetez pas** les aiguilles pour stylo-injecteur éparées dans vos ordures ménagères.
- Jetez le KwikPen usagé dans un contenant pour objets pointus et tranchants après en avoir retiré l'aiguille.
- Si vous n'avez pas de contenant pour objets pointus et tranchants, vous pouvez utiliser un contenant ménager qui :
  - est fait de plastique résistant;
  - peut être refermé au moyen d'un couvercle bien ajusté, qui résiste aux perforations et retient les objets pointus à l'intérieur;
  - peut rester stable et en position verticale quand vous l'utilisez;
  - est résistant aux fuites;
  - est muni d'une étiquette indiquant qu'il contient des déchets dangereux.
- Lorsque votre contenant pour objets pointus et tranchants est presque plein, vous devez suivre les directives de votre localité pour vous en débarrasser correctement. Il est possible qu'il existe des règlements locaux concernant la mise au rebut des aiguilles usagées.
- Ne recyclez pas votre contenant pour objets pointus et tranchants une fois qu'il a été utilisé.


## Dépannage

- Si vous n'arrivez pas à retirer le capuchon du KwikPen, tournez-le doucement dans un sens puis dans l'autre, puis retirez-le en tirant tout droit.
- S'il est difficile d'enfoncer le bouton de dose :
  - Le fait d'appuyer plus lentement sur le bouton de dose lui permettra de s'enfoncer plus facilement lors de l'injection.
  - Votre aiguille est peut-être obstruée. Fixez une nouvelle aiguille, puis amorcez le KwikPen.



- Il y a peut-être de la poussière, des aliments ou du liquide à l'intérieur du KwikPen. Jetez le KwikPen et procurez-vous-en un nouveau.

**Renseignements supplémentaires :**

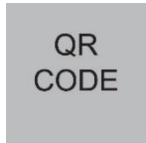

Scannez ce code ou consultez le site [www.mounjaro.ca](http://www.mounjaro.ca) pour obtenir des instructions sur l'utilisation de MOUNJARO KwikPen.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Eli Lilly Canada Inc. au 1-888-545-5972 ou visiter le site Web à l'adresse [www.lilly.ca](http://www.lilly.ca).

Eli Lilly Canada Inc.  
C.P. 73

Toronto (Ontario) M5X 1B1

MOUNJARO® et MOUNJARO® KwikPen® sont des marques déposées d'Eli Lilly and Company, de ses filiales ou de ses sociétés affiliées.

© 2024 Eli Lilly and Company. Tous droits réservés.

Date de publication : 24 SEPT 2024

MOU-CA-KP-0001-20240924



## Calendrier posologique

Utilisez MOUNJARO KwikPen une fois par semaine.

Indiquez le jour de la semaine où vous effectuerez l'injection. Effectuez l'injection chaque semaine au jour indiqué (par exemple : le lundi).

J'injecte ma dose hebdomadaire de 0,6 mL aux dates indiquées ci-dessous.

(jour/mois) (jour/mois) (jour/mois) (jour/mois)

--

--	--	--	--