

# TRULICITY®

dulaglutide pour injection

Pour administration sous-cutanée seulement

Stylo injecteur à usage unique dosé à 3 mg/0,5 mL, une fois par semaine



← Dépliez et posez les instructions à plat →



Lisez les instructions des deux côtés

[www.lilly.ca](http://www.lilly.ca)

## À PROPOS DU STYLO INJECTEUR À USAGE UNIQUE TRULICITY

**Veillez lire attentivement et entièrement le présent manuel et le feuillet de renseignements destiné aux patients avant d'utiliser le stylo injecteur à usage unique TRULICITY. Pour apprendre à utiliser correctement TRULICITY, communiquez avec votre professionnel de la santé ou avec Lilly au 1-888-545-5972.**

- Le stylo injecteur à usage unique TRULICITY est un dispositif d'administration prérempli prêt à l'emploi à jeter après usage. Chaque stylo contient une dose hebdomadaire de TRULICITY (3 mg/0,5 mL). Chaque stylo doit être utilisé **une seule fois**.
- **TRULICITY doit être pris une fois par semaine**. Vous devrez peut-être placer un rappel sur votre calendrier vous indiquant à quel moment vous devez prendre votre prochaine dose.
- Le stylo a été conçu à partir des commentaires reçus des patients afin qu'il soit facile à utiliser.
- Lorsque vous poussez le bouton d'injection vert, le stylo insère automatiquement l'aiguille **dans votre peau**, injecte le médicament et retire l'aiguille **une fois l'injection terminée**.

## AVANT DE COMMENCER



### Retirez

le stylo du réfrigérateur.

N'enlevez pas le capuchon de la base avant d'être prêt à injecter.


Afin de rendre l'injection plus confortable, laissez reposer le stylo à la température ambiante pendant environ 30 minutes. Ne le placez pas au four à micro-ondes et ne le passez pas sous l'eau chaude.



### Vérifiez

l'étiquette pour vous assurer que vous avez le bon médicament et que la date de péremption n'est pas dépassée.

Date de péremption

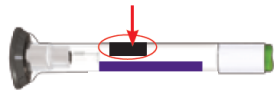

### Inspectez

le stylo pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé et inspectez la solution pour vous assurer qu'elle n'est pas trouble ou décolorée et qu'elle ne contient pas de particules.




### Préparez-vous

en vous lavant les mains.

## CHOISISSEZ LE POINT D'INJECTION


- Votre professionnel de la santé peut vous aider à choisir le point d'injection qui vous convient le mieux.
- Vous pouvez injecter le médicament dans votre abdomen (ventre) ou votre cuisse.
- Une autre personne peut vous administrer le médicament dans la partie supérieure de votre bras.
- Changez de point d'injection chaque semaine (faites une rotation). Vous pouvez injecter le médicament dans la même partie de votre corps, mais assurez-vous de choisir un point d'injection différent dans cette région.

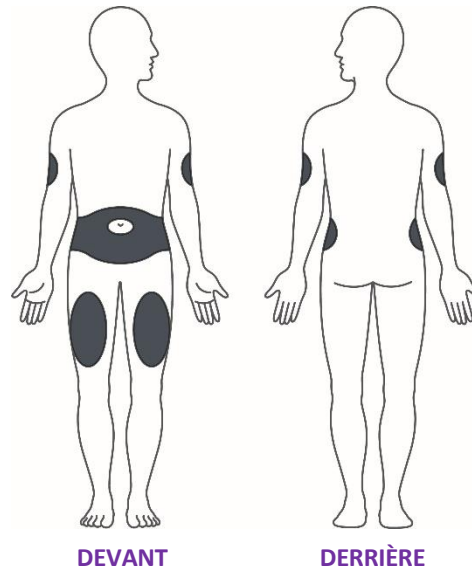


**À retenir :**

- 1. RETIREZ LE CAPUCHON**
- 2. PLACEZ ET DÉVERROUILLEZ**
- 3. APPUYEZ ET MAINTENEZ**

Haut ►

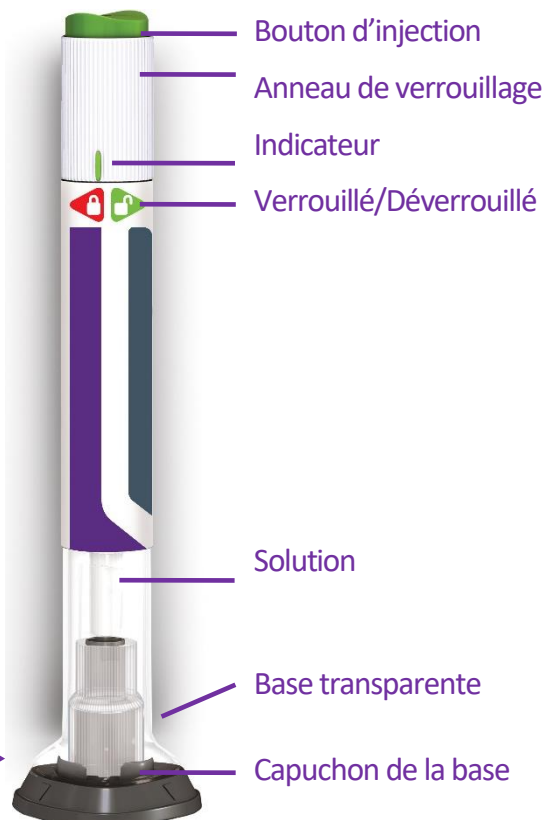


## 1 RETIREZ LE CAPUCHON

 Assurez-vous que le stylo est **verrouillé**.

- Tirez sur le capuchon de la base gris et jetez-le.


**Ne remettez pas le capuchon en place – cela pourrait endommager l'aiguille.**

**Ne touchez pas à l'aiguille.**

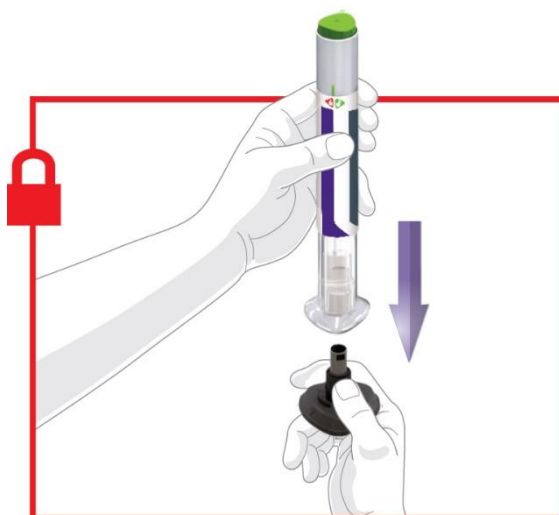

## 2 PLACEZ ET DÉVERROUILLEZ


- Placez la base transparente bien à plat sur le point d'injection et appuyez-la fermement sur la peau.

 **Déverrouillez** en dévissant l'anneau de verrouillage.




## 3 APPUYEZ ET MAINTENEZ

- Appuyez sur le bouton d'injection vert et maintenez-le enfoncé; vous entendrez un « clic » fort.

 Continuez à maintenir fermement la base transparente sur la peau jusqu'à ce que vous entendiez un deuxième « clic ». Cela indique que l'aiguille commencera à se rétracter dans 5 à 10 secondes.

- Retirez le stylo de votre peau.

**Vous saurez que l'injection est terminée lorsque la pièce grise sera visible.**

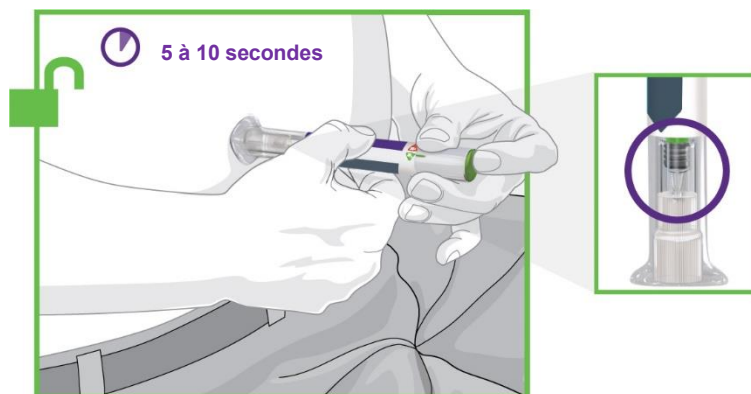

## RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Mise au rebut du stylo

Conservation et manipulation

Questions fréquentes

Autres renseignements

Pour de plus amples renseignements

### MISE AU REBUT DU STYLO

- Jetez le stylo dans un contenant refermable pour la mise au rebut des objets pointus et tranchants (par exemple un contenant pour objets contaminés).
- Ne mettez pas le contenant rempli au recyclage.
- Informez-vous auprès de votre professionnel de la santé sur les options pour mettre au rebut les contenants pour objets pointus et tranchants de façon adéquate dans votre région.
- Les instructions concernant la manipulation et la mise au rebut du stylo ne sont pas destinées à remplacer les politiques locales ou institutionnelles ni les directives de votre professionnel de la santé.



### CONSERVATION ET MANIPULATION

- Le stylo comporte des pièces en verre. Manipulez-le avec soin. Si vous l'échappez sur une surface dure, ne l'utilisez pas. Utilisez plutôt un nouveau stylo pour votre injection.
- Conservez votre stylo au réfrigérateur.
- Si ce n'est pas possible, vous pouvez conserver votre stylo hors du réfrigérateur à une température ne dépassant pas 30 °C pendant une durée maximale de 14 jours.
- Ne placez pas le stylo au congélateur. Si le stylo a été congelé, NE L'UTILISEZ PAS.
- Gardez le stylo TRULICITY loin de toute source directe de chaleur et de lumière.
- Pour obtenir de plus amples renseignements sur la conservation du stylo, veuillez lire le feuillet de renseignements destiné aux patients.

### QUESTIONS FRÉQUENTES

#### Que faire s'il y a des bulles d'air dans le stylo?

La présence de bulles d'air est normale. Elles sont sans danger et ne changeront pas la dose.

**Que faire si j'ai déverrouillé le stylo et appuyé sur le bouton d'injection vert avant d'avoir retiré le capuchon de la base?**

Ne retirez pas le capuchon de la base. Jetez le stylo conformément aux directives. Injectez la dose en utilisant un autre stylo.

**Que faire s'il y a une goutte de liquide au bout de l'aiguille lorsque j'enlève le capuchon de la base?**

Il est normal d'apercevoir une goutte de liquide au bout de l'aiguille. Cela ne change pas la dose.

**Dois-je maintenir le bouton d'injection enfoncé jusqu'à la fin de l'injection?**

Ce n'est pas nécessaire, mais cela pourrait vous aider à maintenir fermement le stylo en place contre votre peau.

**Qu'est-ce que ça signifie si j'entends plus de deux « clics » pendant l'injection (deux « clics » forts et un plus faible)? Ai-je bien reçu la dose complète?**

Certains patients peuvent entendre un faible « clic » juste avant le deuxième « clic » fort. Ce faible « clic » est un bruit normal du stylo. Ne retirez pas le stylo de la peau avant d'avoir entendu le deuxième « clic » fort.

**Que faire s'il y a une goutte de liquide ou de sang sur ma peau après l'injection?**

Cela est normal et ne changera pas la dose.

**Je ne sais pas si mon stylo a fonctionné correctement.**

Vérifiez si vous avez reçu votre dose. Si la pièce grise du stylo est visible, cela signifie que la dose a été administrée correctement (voir l'étape 3). Veuillez communiquer avec Lilly au 1-888-545-5972 pour obtenir de plus amples renseignements sur votre stylo. Entre-temps, conservez votre stylo dans un lieu sûr afin d'éviter une piqûre d'aiguille accidentelle. Si votre dose n'a pas été administrée, vous devez aussi communiquer avec votre professionnel de la santé pour discuter de la maîtrise de votre glycémie.

**AUTRES RENSEIGNEMENTS**

- Si vous avez un trouble de la vue, N'UTILISEZ PAS le stylo sans l'aide d'une personne ayant reçu la formation nécessaire sur le stylo TRULICITY.
- Gardez le stylo hors de la portée et de la vue des enfants.

**POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS**

- Si vous avez des questions ou des problèmes concernant votre stylo injecteur à usage unique TRULICITY, communiquez avec votre professionnel de la santé ou avec Lilly au 1-888-545-5972.
- Pour en savoir plus au sujet du stylo injecteur à usage unique TRULICITY, visitez notre site Web au [www.lilly.ca](http://www.lilly.ca).

**Fabriqué par :**

Eli Lilly and Company  
Pharmaceutical Delivery Systems

Lilly Corporate Center  
Indianapolis, IN 46285, USA

**Distribué par :**

Eli Lilly Canada Inc.  
C.P. 73  
Toronto (Ontario)  
M5X 1B1

TRULICITY est une marque déposée détenue ou utilisée sous licence par Eli Lilly and Company ou l'une de ses filiales ou sociétés affiliées.

L'information contenue dans le présent document était à jour en date de la dernière révision figurant ci-dessous. Pour obtenir l'information la plus récente, veuillez consulter notre site Web au [www.lilly.ca](http://www.lilly.ca) ou communiquer directement avec nous au 1-888-545-5972.

© 2022, Eli Lilly and Company. Tous droits réservés.

Approuvé : août 2022

Le stylo injecteur TRULICITY répond aux normes actuelles d'exactitude de la dose et aux exigences fonctionnelles ISO 11608-1 et 11608-5.

TRU3MG-0001-CA-IFU-20220825